

## Pflege *pIRx3*

Zur Pflege des *pIRx3* empfehlen wir MK75 Destix, feuchte Desinfektionstücher.

Bezogen werden kann das Produkt in der Schweiz bei:

Global Tool Trading AG  
Sonnenbühlweg 1  
6010 Kriens  
Tel.: +41 (41) 342 02 77  
Fax: +41 (41) 342 02 78  
<http://www.gttag.ch>  
[info@gttag.ch](mailto:info@gttag.ch)

Und in Deutschland bei:

Volker Kunz  
Kleinmann GmbH  
Member of ITW Group  
Am Trieb 13  
D-72820 Sonnenbuehl  
Tel.: +49 (0) 7128 9292-0  
[info@kleinmann.net](mailto:info@kleinmann.net)



Reinigen Sie Ihren *pIRx3* mit einem sauberen und mit Alkohol oder Isopropanol befeuchteten Tuch oder mit Destix MK75 feuchten Desinfektionstüchern, gemäss Anleitung. Besprühen Sie den *pIRx3* niemals mit Alkohol oder anderen Flüssigkeiten, da das Material sonst quellen kann. Reiben Sie die zu desinfizierende Oberfläche vorsichtig aber gründlich ab und reiben Sie diese nach 1 Minute Einwirkzeit mit einem saugfähigen Tuch trocken.

Die Sensoren müssen sauber gehalten werden, da Partikel auf der Oberfläche der Sensorfenster die Temperaturmesswerte beeinflussen. Verwenden Sie ein mit Isopropanol oder Alkohol befeuchtetes Tuch oder einen Wattebausch, um die Sensoren vorsichtig zu säubern.

Das Kopfband kann bei 40°C mit Seife oder Waschmittel gewaschen werden.